



Le nuove LENTI OPTX 20/20 AGGIUNTIVE REMOVIBILI, della ditta americana NEOPTX, sono brevettate a livello internazionale e sono indicate per la **presbiopia** per i seguenti valori correttivi: +1,25, +1,50, +1,75, +2,00, +2,50, +3,00.

Sono applicabili su qualsiasi tipo di maschere subacquee e occhiale da sole/neutro “senza correzioni ottiche”.

L'estrema semplicità nell'applicazione rende uniche le lenti OPTX 20/20.

Istruzioni per l'applicazione delle lenti OPTX 20/20 su qualsiasi tipo di maschera subacquea e occhiale da sole

1- Lavare con acqua calda e sapone le lenti della vostra maschera subacquea e/o occhiale, avendo cura di lasciare le superfici leggermente inumidite.

La maschera e le lenti OPTX devono mantenere la temperatura calda dell'acqua, circa 35°.

2- Applicare le lentine posizionandole vicino al naso, nella parte più bassa della maschera e/o occhiale, e premendo con un panno asciutto, in modo da far fuoriuscire l'acqua e l'aria in eccesso.

3- **Attendere 48 ore** per le maschera da sub e **24 ore** per l'occhiale.
Per rimuovere le lenti, basta sollevarne un lembo.

IMPORTANTE

Nel caso le lenti siano troppo grandi per il vostro occhiale ed interferiscano con la visione per “lontano”, si consiglia di tagliare con una forbice la parte in eccesso. Attenzione: non usare alcool o solventi per pulire le lenti OPTX 20/20, ma solo acqua e sapone.